



## 1. Produktname

Nenko Snoezelen-Wagen mit Bildschirm

## 2. Produktcode

21970010

## 3. Farbe

Wie abgebildet



## 4. Beschreibung

Dieser Snoezelwagen mit LED-Bildschirm wird aus Sicherheits- und Servicegründen auf einer Palette geliefert.

## 5. Sinnesstimulation

Fühlen, riechen, hören und sehen

## 6. In Betrieb nehmen

1. Sie erhalten den Snoezelwagen auf einer Palette.
2. Fahren Sie den Wagen vorsichtig von der Palette herunter.
3. Nehmen Sie den Schlüssel ab und öffnen Sie die Tür. Der Schlüssel befindet sich oben auf dem Wagen.
4. Füllen Sie nun die Blasensäule mit Wasser. Achten Sie darauf, die Säule nicht zu voll zu füllen und vermeiden Sie, dass Wasser außerhalb der Säule austritt, um Schäden an den elektronischen Bauteilen zu verhindern. Weitere Anweisungen zu Blasensäulen finden Sie auf unserer Website. Achtung: Schließen Sie den Snoezelwagen noch nicht an das Stromnetz an, solange die Säule noch nicht mit Wasser gefüllt ist.
5. Nehmen Sie alle Produkte aus der Verpackung und schließen Sie die losen Stecker an die entsprechenden Produkte an.
6. Den Stecker des Bereichs mit der Blaseneinheit können Sie an der Seite des Snoezelwagens anschließen.
7. Im Schrank befindet sich ein Schaltpanel, mit dem die Produkte ein- oder ausgeschaltet werden können. Achtung: Die Artikel selbst können ebenfalls über einen separaten Ein-/Ausschalter verfügen.  
Für den Bedienungsplan siehe den mitgelieferten Plan.
8. Schließen Sie den Wagen an das Stromnetz an. Er ist nun einsatzbereit.

## 9. Spezifikationen

Abmessungen: 65 x 60 x 147 cm

Stromversorgung: 220 V

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website [www.nenko.de](http://www.nenko.de)

