



1. Produktname

Nenke Snoezelen-Wagen Sense System

2. Produktcode

21981010

3. Kurze Beschreibung

Dieser Snoezelwagen Sense System wird aus Sicherheits- und Servicegründen in einer Holzkiste geliefert.

=Wir empfehlen Ihnen, die mitgelieferte Holzkiste für eventuelle Servicezwecke aufzubewahren=



1. Öffnen Sie die Transportkiste mit einem Kreuzschraubendreher.
2. Lösen Sie die Bremsen der vorderen Rollen und schieben Sie den Wagen aus der Kiste.
3. Hängen Sie den Faservorhang neben den Wagen.
4. Oben auf dem Wagen befindet sich der Schlüssel zum Öffnen der Vorder- und Rückseite.
5. Öffnen Sie die untere vordere Tür des Snoezelwagens.
6. Nehmen Sie den Beamer, den LED-Spot und den Laserstar aus dem Schrank und stellen Sie diese auf den Wagen.
7. Schließen Sie das Tablet mit dem mitgelieferten HDMI-Kabel an den Beamer an.
8. Das Tablet verbindet sich automatisch mit dem Bluetooth-Controller (sofern dieser eingeschaltet und eingesteckt ist), sobald Sie die Nenke-App starten.
9. Schließen Sie den Spot oben am Wagen an das dicke schwarze Kabel an.
10. Nehmen Sie das 3 Meter lange Stromkabel aus dem Schrank. Stecken Sie ein Ende in den Außenanschluss (rechte Seite von vorne gesehen) und das andere Ende in die Steckdose im Raum.
11. Nehmen Sie den Adapter (Anschluss für die Blasensäule) aus dem Schrank und stecken Sie ihn in den zweiten Außenanschluss unter den Fasern.
12. Öffnen Sie nun auch die Rückseite des Wagens mit dem Schlüssel. Dort befindet sich ein ausziehbares Modul mit Blasensäule und Spiegel. Ziehen Sie das Holzpanel leicht am Griff heraus.
Um das Modul leicht wieder einzuschieben, drücken Sie mit dem Fuß auf die hintere Platte, kippen es leicht zurück, schieben es hinein und lassen es wieder herunter.
13. Stellen Sie das ausziehbare Modul neben den Wagen und blockieren Sie die Rollen.
14. Füllen Sie die Blasensäule zu 80 %, damit Platz für die Blasen bleibt.
15. Stecken Sie das andere Ende des kleinen Stromkabels in die Blasensäule.
16. Öffnen Sie erneut den vorderen Schrank. Dort befindet sich eine Schaltbox mit 6 roten Tasten. Diese steuern die elektrischen Geräte. Im beiliegenden Schema ist angegeben, welche Taste welches Gerät einschaltet (von links nach rechts).
Achtung: Stecken Sie immer zuerst den Stecker des Wagens in die Steckdose, bevor Sie die roten Tasten einschalten!
Taste 1 Blasensäule
Taste 2 Faseroptik
Taste 3 Tablet + Verstärker + Mini-Beamer
Taste 4 Star Light Projektor
Taste 5 Spot
Taste 6 Aromadiffusor
17. Der Snoezelwagen ist nun einsatzbereit!



4. Sinnesstimulation

Fühlen, riechen, hören und sehen

5. Spezifikationen

Maße: 60 x 70 x 145 cm

Stromversorgung: 220 V

6. Inklusive

Alles wie abgebildet

- Desinfektionstabletten für Blasensäulen – Set von 5
- Zusätzliches Ölpatronen für Aromadiffusor
- Nenko LED-Lichtquelle für Fasern
- Duftset mit 4 Ölmischungen
- Wandhalterung für Sense-Screen
- Beamerhalterung

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.nenko.de

