



1. Produktname

Nenko Snoezelen-Wagen Sense System

2. Produktcode

21981010

3. Beschreibung

Dieses Snoezelwagen Sense System wird aus Sicherheits- und Servicegründen auf einer Palette geliefert.

= Wir empfehlen, die mitgelieferte Holztransportkiste für eventuelle Servicezwecke aufzubewahren =

1. Öffnen Sie die Palette vorsichtig.
2. Lösen Sie die Bremsen der vorderen Rollen unter dem Snoezelwagen und fahren Sie den Wagen von der Palette herunter.
3. Hängen Sie den Faserlichtschleier neben den Wagen.
4. Der Schlüssel zum Öffnen der Vorder- und Rückseite des Snoezelwagens befindet sich oben auf dem Wagen.
5. Öffnen Sie die untere Schranktür an der Vorderseite des Snoezelwagens.
6. Nehmen Sie den Beamer, den LED-Spot und den Laser-Sternprojektor aus dem Schrank und stellen Sie diese auf den Wagen.
7. Verbinden Sie das Tablet mit dem Beamer mithilfe des mitgelieferten HDMI-Kabels.
8. Das Tablet verbindet sich automatisch mit dem Bluetooth-Controller.
9. Schließen Sie den Spot an der Oberseite des Wagens an das dicke schwarze Kabel an.
10. Nehmen Sie das 3 Meter lange Stromkabel aus dem Schrank. Stecken Sie ein Ende in die Anschlussbuchse an der Außenseite des Snoezelwagens (rechte Seite von vorne gesehen) und das andere Ende in eine Steckdose im Raum, in dem der Wagen verwendet wird.
11. Nehmen Sie anschließend den Adapter (Anschluss für die Blasensäule) aus dem Schrank und stecken Sie ihn in die andere Anschlussbuchse an der Außenseite des Snoezelwagens, die sich unter dem Faserlichtschleier befindet.
12. Öffnen Sie nun auch die Rückseite des Snoezelwagens mit dem mitgelieferten Schlüssel. Dort befindet sich ein ausziehbares Element mit der Blasensäule und einem Spiegel auf der Rückseite.
13. Stellen Sie das ausziehbare Element mit der Blasensäule neben den Snoezelwagen und blockieren Sie die Rollen vor der Benutzung.
14. Füllen Sie die Blasensäule zu 80 % mit Wasser, sodass noch ausreichend Platz für die Blasen bleibt.
15. Stecken Sie das andere Ende des kleinen Stromkabels, das sich nun an der Außenseite des Snoezelwagens befindet, in die Blasensäule, damit auch diese mit Strom versorgt wird.
16. Öffnen Sie anschließend erneut den vorderen Schrank des Snoezelwagens. In diesem unteren Schrank befindet sich ein Schaltkasten mit 6 roten Tasten. Diese Tasten sind die Ein-/Aus-Schalter der elektronischen Produkte und Komponenten, die im und auf dem Snoezelwagen verwendet werden. Der mitgelieferte Schaltplan zeigt deutlich, welche Taste zu welchem Gerät gehört (von links nach rechts).

Achtung: Stecken Sie immer zuerst den Netzstecker des Snoezelwagens in die Steckdose und schalten Sie erst danach die roten Tasten ein.

Taste 1: Blasensäule

Taste 2: Faseroptik

Taste 3: Tablet + Verstärker + Mini-Beamer

Taste 4: Sternenlicht-Projektor





Taste 5: Spot

Taste 6: Aromadiffusor

17. Der Snoezelwagen ist nun einsatzbereit.

4. Sinnesstimulation

Tasten, Riechen, Hören und Sehen

5. Spezifikationen

Abmessungen: 60 x 70 x 145 cm

Stromversorgung: 220 V

6. Lieferumfang

Alles wie abgebildet

- Desinfektionstabletten für Blasensäulen (1 Set mit 5 Stück)
- Extra-Ölpatrone für Aromadiffusor
- Nenko LED-Lichtquelle für Faseroptik
- Duftset mit 4 Duftöl-Mischungen
- Wandhalterung für Sense-Bildschirm
- Beamerhalterung

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.nenko.de

