



1. Produktname

Nenko Snoezelen-Materialen-Wagen

2. Produktcode

44503010

3. Farbe

wit



4. Beschreibung

1. Öffnen Sie die Türen des Snoezelen-Materialwagens.
2. Hängen Sie den Faserlichtschleier an den Wagen.
3. Nehmen Sie den Projektor aus dem Schrank und stellen Sie ihn auf den Wagen.
4. Nehmen Sie das 3 Meter lange Stromkabel aus dem Schrank. Stecken Sie ein Ende in die Anschlussbuchse an der Außenseite des Snoezelen-Wagens (rechte Seite von vorne gesehen) und das andere Ende in eine Steckdose im Raum, in dem der Wagen verwendet wird.
5. Füllen Sie die Blasensäule zu 80 % mit Wasser, sodass noch ausreichend Platz für die Blasen bleibt.
6. Stecken Sie das andere Ende des kleinen Stromkabels, das sich nun an der Außenseite des Wagens befindet, in die Blasensäule, damit auch diese mit Strom versorgt wird.
7. Öffnen Sie anschließend den unteren Schrank an der Vorderseite des Snoezelen-Wagens. In diesem befindet sich ein Schaltkasten mit 6 roten Tasten. Diese Tasten sind die Ein-/Aus-Schalter der elektronischen Produkte und Komponenten, die im und auf dem Snoezelen-Wagen verwendet werden. Im mitgelieferten (und untenstehenden) Schaltplan ist deutlich angegeben, welche Taste zu welchem Gerät gehört (von links nach rechts).
Achtung: Stecken Sie immer zuerst den Netzstecker des Snoezelen-Wagens in die Steckdose und schalten Sie erst danach die roten Tasten ein.
Taste 1: Aromadiffusor
Taste 2: Faseroptik
Taste 3: Blasensäule
Taste 4: Space-Projektor
Taste 5: Musiksysteem
Taste 6: Blasensäule
8. Vergessen Sie nicht die mitgelieferte kleine Kartonschachtel. Diese befindet sich im unteren Schrank. In dieser Schachtel befinden sich die Fernbedienung für den CD-Player, eine CD, 1 Effektrad und 2 Duftmischungen (diese Düfte können mit dem Aromadiffusor verwendet werden).
9. Setzen Sie ein Effektrad in den Space-Projektor ein und überprüfen Sie, ob alle Schalter am Projektor auf „Ein“ stehen.
10. Geben Sie 4 Tropfen einer Duftmischung auf das Aromapad, das sich an der Unterseite des Aromadiffusors befindet. Schrauben Sie die Unterseite des Diffusors ab, geben Sie 4 Tropfen des gewünschten Dufts auf das Aromapad und schrauben Sie die Unterseite wieder fest.
11. Der Snoezelen-Wagen ist nun einsatzbereit.

5. Sinnesstimulation

Tasten, Riechen, Hören und Sehen





6. Spezifikationen

Abmessungen: 94 x 62 x 127 cm

Stromversorgung: 220 V

7. Lieferumfang

- 1 x Snoezelen-Materialwagen
- 1 x Aromadiffusor
- 1 x HiFi-Musiksystem mit CD-Player
- 1 x Lichtquelle
- 1 x Faserlichtschleier
- 1 x Blasensäule
- 1 x Projektor
- 4 x Aufbewahrungsboxen
- 1 x Sinnes-Set – Hören
- 1 x Sinnes-Set – Sehen
- 1 x Sinnes-Set – Tasten
- 1 x Sinnes-Set – Riechen

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.nenko.de

