

1. Produktname

Gewichtsdecke – Manta (2,9 kg)

2. Produktcode

49293872

3. Farbe

Wie abgebildet



4. Beschreibung

Diese Gewichtsdecke Manta wurde speziell für Menschen entwickelt, die häufig unter körperlichem Stress oder Unruhe leiden. Die Decke kann dabei helfen, dem Körper in Stresssituationen Ruhe zu gönnen. Durch das Gewicht in Kombination mit einem langen und beschwerten Körper bietet die Gewichtsdecke Entlastung, Ruhe und Geborgenheit für Menschen mit Reizverarbeitungsproblemen, Verspannungen und Schlafproblemen. Kinder, Erwachsene und ältere Menschen mit Demenz können von der Anwendung profitieren.

5. Inbetriebnahme

1. Manta ist eine Gewichtsdecke von 2,9 Kilo, die Sie auf den Körper des Benutzers legen können.
2. Legen Sie die Flügel gegen den Körper und die Augen auf die Schultern und entspannen Sie sich vollständig.
3. Es ist möglich, die Schweredecke als Werkzeug zum Schlafen zu verwenden, aber es kann auch ein gewichtetes Kuschelgefühl erzeugen.
4. Der gewichtete Strahl ist auch einfach als Schoßkissen zu verwenden, um den Benutzer während des Tages zu stimulieren.
5. Zudem hat das Fell des gewichteten Stachelrochens kleine, superweiche Nieten, die das Tastgefühl anregen, sobald der Strahl gestreichelt wird.

6. Sinne-Stimulation

Tastsinn, propriozeptiv

7. Leistungsbeschreibung

Maße: 59 x 53 x 4 cm

Gewicht: 2,9 kg

8. Einschließlich

1 x Gewichtsdecke

9. Instandhaltung

1. Die Gewichtsdecke kann in der Waschmaschine in einem Kissenbezug gewaschen werden.
2. Die Gewichtungselemente müssen vor dem Waschen entfernt werden.
3. Bei 30 Grad waschen, weich waschen. Wenn Manta nach dem Waschen seine Form ändert, kann es mit den Händen wieder geformt werden.