



1. Produktname

Gewichtsdecke Kokos (2,2 kg)

2. Produktcode

59292872

3. Farbe

Wie abgebildet

4. Beschreibung

Diese Gewichtsdecke Kokos wurde speziell für Menschen entwickelt, die häufig unter körperlichem Stress oder Unruhe leiden. Die Decke kann dabei helfen, dem Körper in Stresssituationen Ruhe zu gönnen. Durch das Gewicht in Kombination mit einem langen und beschwerten Körper bietet die Gewichtsdecke Entlastung, Ruhe und Geborgenheit für Menschen mit Reizverarbeitungsproblemen, Verspannungen und Schlafproblemen. Kinder, Erwachsene und ältere Menschen mit Demenz können von der Anwendung profitieren

5. Inbetriebnahme

1. Legen Sie die gewichtete Decke auf die Bettdecke des Benutzers und genießen Sie den Druck, dadurch wird der Körper wieder vollständig entspannt.
2. Das gewichtete Lama ist leicht auf den Bauch des Benutzers zu legen.
3. Legen Sie den (gewichteten) Nacken über die Schulter, dies gibt ein gewichtetes Gefühl, so dass sich der Benutzer vollständig entspannt.
4. Kokosnuss ist einfach auf dem Schoß, aber auch im Bett zu verwenden.
5. Darüber hinaus ist es auch möglich, die Gewichtsdecke über den Körper zu legen, auf diese Weise kann Kokosnuss direkt gekuschelt werden.

6. Sinne-Stimulation

Gefühl, propriozeptiv (Druck)

7. Leistungsbeschreibung

Maße: 77 x 42 x 5 cm

Gewicht: 2,2 kg

8. Einschließlich

1 x Verwaringsdecken

9. Reinigung

1. Die Wiegedecke kann in der Waschmaschine in einem Kissenbezug gewaschen werden.
2. Die Gewichtungselemente müssen vor dem Waschen entfernt werden.
3. Bei 40 Grad waschen, weich waschen.
4. Wenn Kokosnuss nach dem Waschen ihre Form ändert, kann sie mit den Händen wieder geformt werden.